

Рекомендации по уходу за изделием «Силиконовая накладка на палец»

Средний срок службы изделия – 2 года, но при хорошем уходе изделие может прослужить гораздо дольше. Внимательно прочтите данные рекомендации и старайтесь следовать им ежедневно.

Изделие необходимо очищать каждый день, мягко протирая его мыльным раствором. Не используйте абразивные, отбеливающие и агрессивные вещества для чистки. Края изделия очень тонкие, поэтому обращайтесь с ними аккуратно. Переднюю часть изделия необходимо протирать пальцами с небольшим количеством мыльного раствора. Изделие можно прополоскать в теплой воде и промочить тонкой тканью или марлей.

Изделие не следует носить более 6 часов подряд. На ночь изделие всегда необходимо снимать.

Для дополнительной фиксации изделия следует использовать силиконовый косметический клей, производства компании Техновент (артикул B460, B530 или G609). Внимательно прочитайте инструкцию к клею перед использованием. При снятии изделия необходимо пользоваться жидкостью для снятия силиконового косметического клея производства компании Техновент (артикул G608). Удалите с помощью жидкости все остатки клея с изделия. Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием.

Хранить изделие следует в сухом чистом вентилируемом месте. Избегать попадания прямых солнечных лучей и держать вдали от огня. Помните, изделие требует бережного ухода.

Гарантийное обслуживание изделия осуществляет ООО «Исток Аудио Мед».

Бесплатное гарантийное обслуживание изделия осуществляется в течение 6 месяцев со дня выдачи при наличии даты выдачи, печати в гарантийном талоне.

В течение гарантийного срока эксплуатации в случае дефекта изделия владелец имеет право на бесплатную замену.

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия:

- С механическими повреждениями, потерями
- Носящие следы химического воздействия
- При нарушении условий эксплуатации

В этих случаях замена протеза производится за счет покупателя.