

Рекомендации по уходу за протезно-ортопедическим изделием «Лицевой протез»

Protez-Studio

В данной брошюре представлены рекомендации по уходу за лицевым протезом. Следуя рекомендациям, Вы сможете получить максимальную пользу от его применения и продлить срок службы изделия.

1. Общая информация об уходе за протезом.

1.1. Ежедневный уход.

Средний срок службы протеза – 2 года, но при хорошем уходе протез может прослужить гораздо дольше. Внимательно прочтите данные рекомендации и старайтесь следовать им ежедневно. Протез необходимо очищать каждый день, мягко протирая его мыльным раствором. Не используйте абразивные, отбеливающие и агрессивные вещества для чистки протеза. Края протеза очень тонкие, поэтому обращайтесь с ними аккуратно. Переднюю часть протеза необходимо протирать пальцами с небольшим количеством мыльного раствора. Протез можно прополоскать в теплой воде и промочить тонкой тканью или марлей.

Особенности ежедневного ухода за протезами в зависимости от типа фиксации:

1. Тип фиксации – клей. Для приклеивания протеза следует использовать силиконовый косметический клей (Техновент, артикулы В460, В530 или G609). Внимательно прочитайте инструкцию к клею перед использованием. При снятии протеза необходимо пользоваться жидкостью для снятия силиконового косметического клея (Техновент, артикул G608). Удалите с помощью жидкости все остатки клея с протеза. Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием.
2. Тип фиксации – имплантаты. В случае фиксации лицевого протеза с помощью имплантатов возможно использование клея для краев (Техновент, артикул G604) для подклеивания тонких краев к коже. Также можно использовать клей G609 или В-460. В случаях использования клея для фиксации краев необходимо каждый раз по окончании пользования протезом удалять остатки клея специальной жидкостью (артикул G608). Необходимо ежедневное проведение гигиенических процедур вокруг абатментов – рекомендуется очищать область вокруг них мягкой щеткой или неспиртосодержащими салфетками. Направляйте ворс щетки на боковые стороны абатмента и осторожно удаляйте загрязнения у оснований. Это можно делать даже в душе, используя слабый мыльный раствор с большим количеством теплой воды.

Всегда прополаскивайте щетку для чистки абатмента в слабом мыльном растворе с теплой водой и давайте ей высохнуть на воздухе. Заменяйте щетку каждые три месяца, а также после инфекционных заболеваний. Если вы носите несколько протезов, используйте для каждого из них отдельную щетку, чтобы не допустить переноса инфекции.

Если ваш протез установлен на балке с клипсовым присоединением, протрите загрязнения под балкой и вокруг абатментов влажными ватными тампонами, также можно обработать области вокруг балки и абатментов неспиртосодержащей гигиенической салфеткой.

Если ткани выглядят воспаленными, покрасневшими или имеют признаки раздражения, обратитесь к лечащему врачу.

Пациентам, которые не могут сами обрабатывать область вокруг абатмента, необходима помощь со стороны членов семьи или социальных работников.

3. Тип фиксации – очковая оправа. В случае необходимости подклеивания краев протеза к коже, используйте силиконовый косметический клей (Техновент, артикул G604 – клей для краев или B460, B530 или G609). Внимательно прочитайте инструкцию к клею перед использованием. При снятии протеза необходимо пользоваться жидкостью для снятия силиконового косметического клея производства компании Техновент (артикул G608). Удалите с помощью жидкости все остатки клея с протеза. Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием.

1.2. Хранение протеза.

Хранить протез следует в сухом чистом вентилируемом месте. Класть его следует задней стороной вверх, это не даст краям протеза заворачиваться вверх. Избегать попадания прямых солнечных лучей и держать вдали от огня.

2. Ношение протеза

Протез можно носить при повседневных занятиях, включая плавание и занятия спортом. Если Вы занимаетесь контактным видом спорта, протез необходимо снять и закрыть область протеза повязкой.

Протез не следует носить более 6 часов подряд. На ночь протез всегда необходимо снимать.

3. Хранение протеза

Храните протез в чистом сухом вентилируемом месте. Кладите его на хранение задней стороной вверх, это не даст тонким краям протеза заворачиваться вверх. Избегайте попадания на него прямых солнечных лучей и воздействия высоких температур.

4. Уход за волосами при фиксации протеза с помощью имплантатов

Если вам нужно сделать химическую завивку или покрасить волосы, снимите протез и закройте абатменты небольшими ватными тампонами, закрепите тампоны небольшой эластичной повязкой. Это предотвратит раздражение в области абатмента. Химическая завивка допускается только после полного заживления области имплантации.